

*e*お薬さん

管理者マニュアル

目次

- * 本マニュアルではクラウドをご利用になられる方々を以下のように定義しています。
- 管理者 : 機器情報(患者様登録、パスワード変更など)を管理する方(薬剤師など)
 - ユーザー : クラウドから通知メールを受信する方(ご家族や看護師など)
 - 患者様 : 機器を利用して服薬される方

目次	1
1.「e お薬さん」クラウドサービスの利用を開始する	2
管理者用ログインアカウントの登録	2
「e お薬さん」クラウドサービスにログインする	4
「e お薬さん」クラウドサービスからログアウトする	6
管理者プロフィールを設定する	7
アラート(通知メール)を設定する	7
機器情報を登録する	10
ユーザー・ログイン用のパスワードを変更する	13
ユーザー向けアラート(通知メール)を設定する	16
2.機器情報をクリアする	20
機器情報をクリアする	20
過去に削除した機器情報を表示する	21
3.機器一覧から削除する	22
機器一覧から削除する	22
4.服薬情報の管理	24
服薬状況を確認する	24
検索機能を利用する	25
服薬状況の PDF ファイルをダウンロードまたは印刷する	26
メッセージを送信する	27
5.その他	29
ログイン用パスワードを変更する	29
管理者プロフィールを変更する	30
患者様のプロフィールを変更する	33
お知らせを登録する	37
文字の大きさを変更する	39
お薬ケースを補充する曜日を登録する(週間通知)	40

1.「e お薬さん」クラウドサービスの利用を開始する

管理者用ログインアカウントの登録

最初にアカウントの登録を行います。

クラウドサービスの利用には管理者用ログインアカウントの登録が必要になります。

- 以下の2点をご用意ください。
 - ・初期設定通知書(クラウド登録)
 - * 機器に同梱されています。
 - ・管理者用メールアドレス
 - * メールアドレスが管理者用ログインアカウントになります。
- 初期設定通知書に記載されている管理者アカウント登録の URL(<https://mng001.e-okusurisan.com/person/auth/request>)に Web ブラウザ(インターネット:以下略)からアクセスしてください。表示された利用規約を一読いただき、同意いただける場合には、下方の「規約に同意する」に☑を入れ、登録するメールアドレス、画面に表示されている文字列を入力後、[申請]ボタンを押してください。



eお薬さん

登録申請
利用規約(管理者用) この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、エーザイ株式会社(以下、当社といいます。)が本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。 第1条 (適用) 本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

中略

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

第1/2ページ | 申込画面 | 登録画面

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

以上

☐ 規約に同意する

メールアドレス

g6voto

画像内に表示されている6文字を入力してください。

申請

Presented by Eisai Co.,Ltd.



eお薬さん

登録申請を行いました。
入力いただいたメールアドレスへ送信しましたのでご確認ください。

Presented by Eisai Co.,Ltd.

© 2015 - 2018 by And-Fun Ltd. All rights reserved.

[プライバシーポリシー](#) | [利用規約](#)

3. eお薬さんクラウドサービスから送信される「登録申請 URL 送付」という件名のメールを開き、本文に記載されている URL にブラウザからアクセスしてください。アクセスしますと以下の Web ページが表示されますので、必要事項を入力して、下方の[登録]ボタンを押してください。

【ご注意】

転送先メールアドレスを登録される際は、事前に患者様やご家族にご確認ください。



eお薬さん

登録申請

ログインアカウント

パスワード [必須] パスワードは 英字と数字の両方を含む6桁以上で設定してください。

英字と数字の両方を含む6桁以上のパスワードを入力してください。

氏名（苗字） [必須]

苗字を漢字で入力してください。

氏名（名前） [必須]

名前を漢字で入力してください。

読み（みょうじ）

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

中略

電話番号

電話番号を入力してください。

転送先メールアドレス

転送先メールアドレスを入力してください。 +

※個人を特定できるメールアドレスを登録しないでください。

備考

備考の入力ができます。

登録 リセット

Presented by Eisai Co.,Ltd.



eお薬さん

本登録申請をしました。



Presented by Eisai Co.,Ltd.

© 2015 - 2016 by And-Fun Ltd. All rights reserved.

「e お薬さんクラウドサービス 登録申請完了」という件名のメールが届いたら、管理者用ログインアカウントの登録は完了です。

* ここで登録した情報が管理者のプロフィールとなります。

(プロフィールを変更する場合は、P.33「プロフィールを変更する」を参照)

「e お薬さん」クラウドサービスにログインする

e お薬さんクラウドサービスを利用するには、ログイン画面にて必要事項を入力してログインします。

1. ブラウザから <https://mng001.e-okusurisan.com/> にアクセスします。
2. 登録されたメールアドレス(管理者用ログインアカウント)とパスワードを入力して[ログイン]をクリックします。

1. 「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

【ご注意】

管理者用ログインアカウントは、初期設定通知書に記載の「機器アカウント」とは異なります。
機器アカウントは、管理者以外のユーザー（ご家族やケアマネージャーなど）が利用される際の
ログインアカウントになります。



eお薬さん

ご利用にはログインが必要です。

ログインアカウント

パスワード

ログイン

パスワードを忘れた方はeお薬さんコールセンター
(TEL : 0120-71-0933 受付時間9:00~21:00)
までお問い合わせください

Presented by Eisai Co.,Ltd.

© 2015 - 2018 by And-Fun Ltd. All rights reserved.

3. ログインが完了するとホーム画面が表示されます。

eお薬さん

ホーム 服薬一覧 機器一覧 パスワード変更 お知らせ ヘルプ お薬太郎

ログインしました。

服薬情報

表示できるデータがありませんでした。

管理者からのお知らせ

お知らせはありません。

システム管理者からのお知らせ

11月01日

システム管理者からのお知らせ
2016/11/1 eお薬さんクラウドサービ
スが正式リリースされました。

詳しく見る


「e お薬さん」クラウドサービスからログアウトする

e お薬さんクラウドサービスのご利用が終了しましたらログアウトします。

1. 画面の上部右側に管理者の名前が表示されていますのでクリックします。



2. 表示された一覧内の[ログアウト]をクリックします。

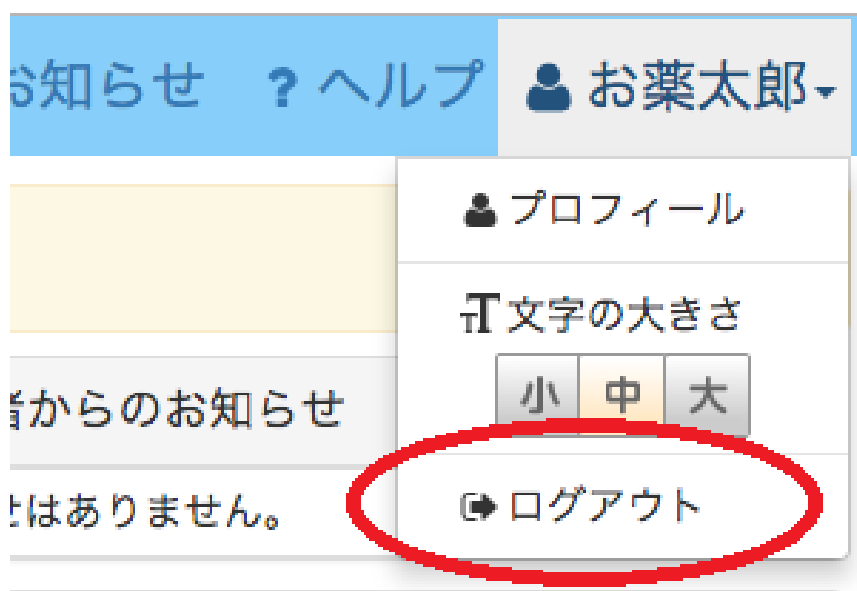

3. ログアウトが完了すると、ログイン画面が表示されます。



eお薬さん

ご利用にはログインが必要です。

ログインアカウント

パスワード

ログイン

パスワードを忘れた方はeお薬さんコールセンター
(TEL : 0120-71-0933 受付時間9:00~21:00)
までお問い合わせください

Presented by Eisai Co.,Ltd.

© 2015 - 2018 by And-Fun Ltd. All rights reserved.


管理者プロフィールを設定する

- * 管理者のプロフィールは、登録申請時の内容で登録されています。

アラート(通知メール)を設定する


管理者登録時は、すべての通知メール(お知らせ、警告メッセージ、異常メッセージ)を配信するようになっています。管理者が必要な通知メールを選択することができます。

1. 画面の上部右側に管理者の名前が表示されていますのでクリックします。

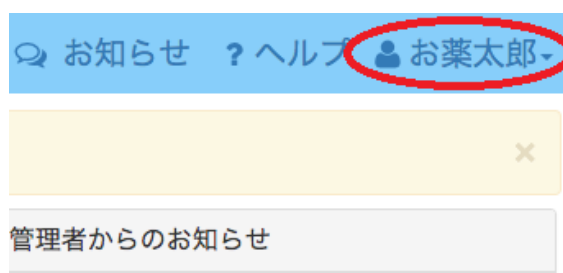

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

2. 表示された一覧内の[プロフィール]をクリックします。

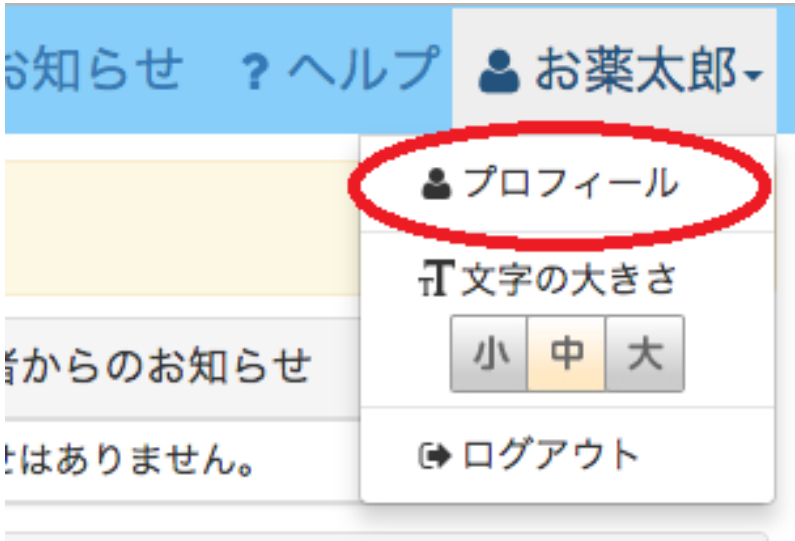

3. プロフィール画面下部の「アラート設定」の[変更]ボタンをクリックします。

アラート設定			
種類	アクション	メール通知	対象
通知	アカウント情報変更時にメールを	受け取る	変更したアカウント
通知	機器報更新時にメール	受け取る	関連付けられたアカウント
通知	管理者のお知らせ追加時にメールを	受け取る	投稿した管理者の管理するユーザー
通知	管理者のお知らせ修正時にメールを	受け取る	投稿した管理者の管理するユーザー
通知	システム管理者のお知らせ追加時にメールを	受け取る	全アカウント
通知	システム管理者のお知らせ修正時にメールを	受け取る	全アカウント
通知	週間残薬通知のメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザ and ユーザに関連付けられた管理者
警告(WA-011)	前面カバーが開いたまま30分放置された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザ and ユーザに関連付けられた管理者
警告(SU-102)	朝の薬が取り出された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザ and ユーザに関連付けられた管理者
警告(WA-101)	朝の薬が任意排出された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザ and ユーザに関連付けられた管理者
警告(WA-102)	朝の薬が取り出されずに戻された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザ and ユーザに関連付けられた管理者
警告(WA-103)	朝の薬がなかった時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザ and ユーザに関連付けられた管理者

中略

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

アラートの種類	アラート発生時の状態	受け取る	アラートに通知されるユーザー（管理者に通知されるユーザー）
警告(WA-004)	寝る前の薬がタイムキャンセルになった時にメールを	受け取る	機器に連携付けられたユーザー and ユーザーに連携付けられた管理者
異常(ER-001)	システムエラー発生時にメールを	受け取る	機器に連携付けられたユーザー and ユーザーに連携付けられた管理者
異常(ER-002)	機器からの通信が30分以上無い場合にメールを	受け取る	機器に連携付けられたユーザー and ユーザーに連携付けられた管理者
通知(SU-003)	機器がメッセージを受信した場合にメールを	受け取る	機器に連携付けられたユーザー and ユーザーに連携付けられた管理者
通知(SU-004)	機器がUSBメモリにログを書き出した場合にメールを	受け取る	機器に連携付けられたユーザー and ユーザーに連携付けられた管理者
警告(WA-001)	機器が初期化された場合にメールを	受け取る	機器に連携付けられたユーザー and ユーザーに連携付けられた管理者

変更

アラートの種類	アラート発生時の状態
通知(SU-004)	機器がUSBメモリにログを書き出した場合にメールを
警告(WA-001)	機器が初期化された場合にメールを

変更

4. アラート設定の画面が表示されます。

アラート設定		
種類	状態	通知
通知	アカウント情報変更時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知	機器報更新時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知	管理者のお知らせ追加時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知	管理者のお知らせ修正時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない

中略

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

002)	にメールを	☐ 受け取らない
通知(SU-003)	機器がメッセージを受信した場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知(SU-004)	機器がUSBメモリにログを書き出した場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
警告(WA-001)	機器が初期化された場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない

5. 変更する項目にチェックし、[登録]ボタンをクリックします。
登録が完了するとプロフィール画面に戻ります。

通知(SU-004)	機器がUSBメモリにログを書き出した場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
警告(WA-001)	機器が初期化された場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない

* ご使用の途中でもアラートを変更することは可能です。同様の手順で変更してください。

機器情報を登録する

管理対象の機器(患者様の指名を含む)を登録します。

登録すると、機器の状態や患者様のご利用状況を表示することができます。

1. 機器に同梱の初期設定通知書をご準備ください。
2. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。

eお薬さん

[ホーム](#)
[服薬一覧](#)
[機器一覧](#)
[パスワード変更](#)
[お知らせ](#)

服薬情報

表示できるデータがありませんでした。

管理者からのお知らせ

お知らせはありません。

1. 「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

3. 機器一覧画面に移動します。



4. [機器情報登録]ボタンをクリックすると機器追加の画面が表示されます。



機器追加（ここで登録した内容はユーザー画面にも表示されます）

シリアルNo **【必須】**

機器に記載されている「シリアルNo」を入力してください。

初期パスワード **【必須】**

「初期設定通知書」に記載されている「初期パスワード」を入力してくださ

氏名（苗字） **【必須】**

苗字を漢字で入力してください。

氏名（名前） **【必須】**

名前を漢字で入力してください。

かな（みょうじ）

苗字をひらがなで入力してください。

かな（なまえ）

名前をひらがなで入力してください。

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

5. 機器に同梱の初期設定通知書に記載された「シリアル番号（機器アカウントの頭8桁（例 1801t001））」、「初期パスワード」を入力後、機器をご利用する患者様情報を入力し、[登録]ボタンをクリックします。
- 登録が完了すると機器一覧画面に戻ります。

機器追加（ここで登録した内容はユーザー画面にも表示されます） ✕

シリアルNo [必須]

初期パスワード [必須]

氏名（苗字） [必須]

氏名（名前） [必須]

かな（みょうじ）

かな（なまえ）

eお薬さん [ホーム](#) [服薬一覧](#) [機器一覧](#) [パスワード変更](#) [お知らせ](#) [ヘルプ](#) [お薬太郎](#)

機器情報を追加しました。 ✕

機器一覧 機器情報登録

☐ AND ☐ OR

1 件

SN : 1801t001 (患者 : 衛材花子) 機器情報クリア 機器一覧から削除

ID	シリアル番号	患者氏名	ステータス	内容
----	--------	------	-------	----

ユーザー・ログイン用のパスワードを変更する

初期設定通知書に記載されたパスワードを変更します（機器ごとに設定します）。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。



2. 機器一覧画面に移動します。



3. 対象機器の下部にある[詳しく見る]をクリックします。



1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

4. 患者様情報画面に移動します。



5. [パスワード変更]ボタンをクリックするとパスワード変更の画面が表示されます。

患者情報

氏名：衛材花子
住所：
電話番号：
転送先：
週間通知：無し
メッセージ：全角20文字まで

変更

パスワード変更

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

6. 新しいパスワードを[新パスワード]と[確認パスワード]の両方に入力し、[登録]ボタンをクリックします。
- 登録が完了するとユーザー情報画面に戻ります。

パスワード変更


新パスワード [必須] パスワードは 英字と数字の両方を含む6桁以上で設定してください。

英字と数字の両方を含む6桁以上のパスワードを入力してください。

確認パスワード [必須]

確認の為、再度パスワードを入力してください。

登録キャンセル

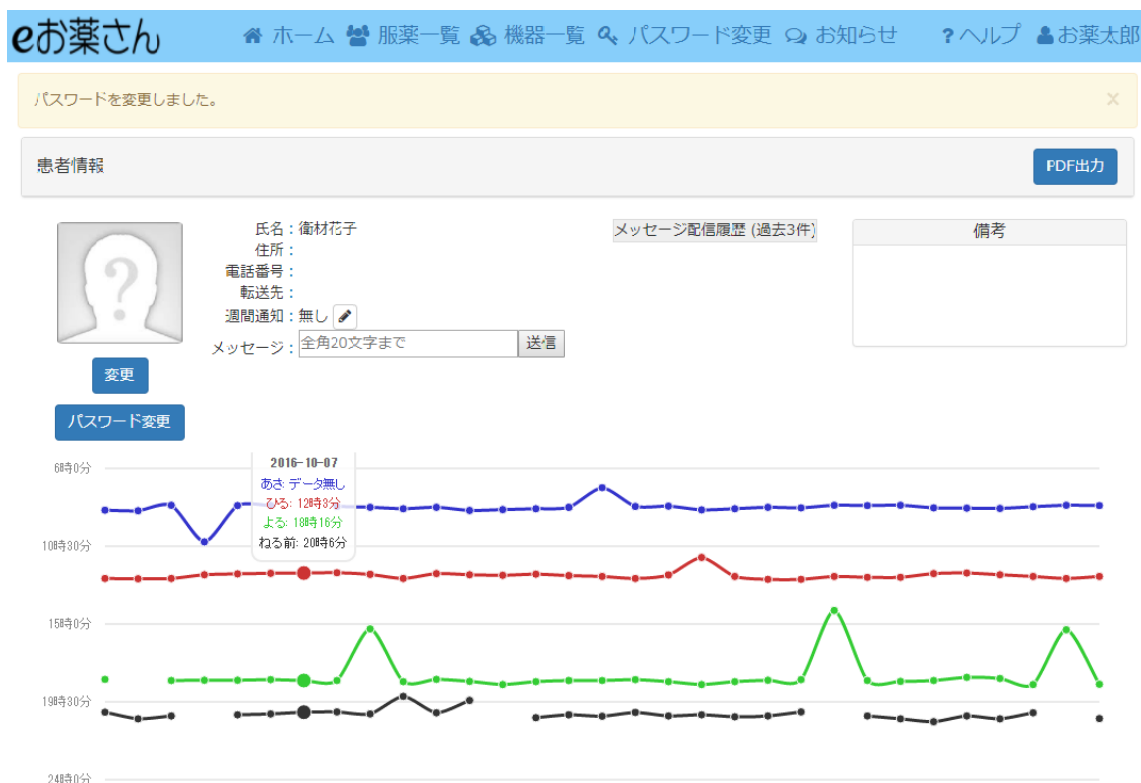

* ご使用の途中でもパスワードを変更することは可能です。同様の手順で変更してください。

ユーザー向けアラート(通知メール)を設定する

* 登録する機器ごとに設定します

機器情報登録時は、ユーザーにすべての通知メール(お知らせ、警告メッセージ、異常メッセージ)を配信するようになっています。管理者は、ユーザーの要望に沿って通知メールを選択することができます。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。



2. 機器一覧画面に移動します。



3. アラート設定対象の機器の下部にある「詳しく見る」をクリックします。



1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

4. 患者様情報画面に移動します。



5. 画面下部に「アラート設定」の一覧がありますので、その一覧の[変更]ボタンをクリックするとアラート設定画面が表示されます。

eお薬さん

ホーム 服薬一覧 機器一覧 パスワード変更 お知らせ ヘルプ お薬太郎

アラート設定

種類	アクション	メール通知	対象
通知	アカウント情報変更時にメールを	受け取る	変更したアカウント
通知	機器更新時にメールを	受け取る	関連付けられたアカウント
通知	管理者のお知らせ追加時にメールを	受け取る	投稿した管理者の管理するユーザー
通知	管理者のお知らせ修正時にメールを	受け取る	投稿した管理者の管理するユーザー
通知	システム管理者のお知らせ追加時にメールを	受け取る	全アカウント
通知	システム管理者のお知らせ修正時にメールを	受け取る	全アカウント
通知	週間残薬通知のメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
警告(WA-011)	前面カバーが開いたまま30分放置された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
警告(SU-102)	朝の薬が取り出された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
警告(WA-101)	朝の薬が任意排出された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
警告(WA-102)	朝の薬が取り出されずに戻された時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
警告(WA-103)	朝の薬がなかった時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
異常(ER-001)	システムエラー発生時にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
異常(ER-002)	機器からの通信が30分以上無い場合にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
通知(SU-003)	機器がメッセージを受信した場合にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
通知(SU-004)	機器がUSBメモリにログを書き出した場合にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者
警告(WA-001)	機器が初期化された場合にメールを	受け取る	機器に関連付けられたユーザー and ユーザーに関連付けられた管理者

変更

1.「e お薬さん」クラウドサービスの
利用を開始する

異常(ER-002)	機器からの通信が30分以上
通知(SU-003)	機器がメッセージを受信し
通知(SU-004)	機器がUSBメモリにログを
警告(WA-001)	機器が初期化された場合に

変更

1.「e お薬さん」クラウドサービスの 利用を開始する

アラート設定		
種類	状態	通知
通知	アカウント情報変更時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知	機器報更新時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知	管理者のお知らせ追加時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知	管理者のお知らせ修正時にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない

中略

通知(SU-001)	機器からの通信が30分以上無い場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
警告(ER-002)	機器からの通信が30分以上無い場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知(SU-003)	機器がメッセージを受信した場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
通知(SU-004)	機器がUSBメモリにログを書き出した場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない
警告(WA-001)	機器が初期化された場合にメールを	☒ 受け取る ☐ 受け取らない

6. 変更する項目にチェックした後、[登録]ボタンをクリックします。
登録が完了するとユーザー情報画面に戻ります。

* ご使用の途中でもユーザー向けアラートを変更することは可能です。同様の手順で変更してください。

2.機器情報をクリアする

機器情報をクリアする

管理対象の機器のデータを消去します。データは消去されますが、管理対象の機器として表示されます。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。



2. 機器一覧画面に移動します。



3. 情報を消去する機器の右上にある[機器情報クリア]をクリックすると、確認画面が表示されます。



4. 機器情報のクリアを聞かれます。情報を消去する場合は、[OK]ボタンをクリックします。その後、機器一覧画面に戻ります。
- にはチェックを入れないことをお勧めします（本画面を頻回に表示させないため）。

mng001.e-okusurisan.com の内容:

機器情報をクリアします。よろしいですか？

☐ このページでこれ以上ダイアログボックスを生成しない

OK

キャンセル

過去に削除した機器情報を表示する

対象の機器の右上にある「過去情報表示」をクリックすると、過去に削除した機器情報を確認することができます。

eお薬さん

[ホーム](#)
[服薬一覧](#)
[機器一覧](#)
[パスワード変更](#)
[お知らせ](#)
[ヘルプ](#)
[お薬太郎](#)

機器一覧

機器情報登録

☒ AND
☐ OR

2 件

SN: 1801t001 (患者:)

過去情報表示

機器情報クリア

機器一覧から削除

状態	管理対象外	発生日時	ステータス	内容
備考				

詳しく見る

「過去情報非表示」をクリックすると元に戻ります。

eお薬さん

[ホーム](#)
[服薬一覧](#)
[機器一覧](#)
[パスワード変更](#)
[お知らせ](#)
[ヘルプ](#)
[お薬太郎](#)

機器一覧

機器情報登録

☒ AND
☐ OR

2 件

SN: 1801t001 (患者:)

過去情報非表示

機器情報クリア

機器一覧から削除

状態	管理対象外	発生日時	ステータス	内容
備考				

詳しく見る

SN: 1801t001_20180322103916 (患者: 衛材花子)

機器一覧から削除

詳しく見る

3.機器一覧から削除する

機器一覧から削除する

管理対象の機器を削除します。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。



2. 機器一覧画面に移動します。




3. 削除対象の機器の右上にある[機器一覧から削除]をクリックすると確認画面が表示されます。



3.機器一覧から削除する

4. 機器情報の初期化を聞かれます。機器一覧から削除する場合、[OK]ボタンをクリックします。
その後、機器一覧画面に戻ります。

なお、削除すると当該機器の過去情報を確認することができなくなります。

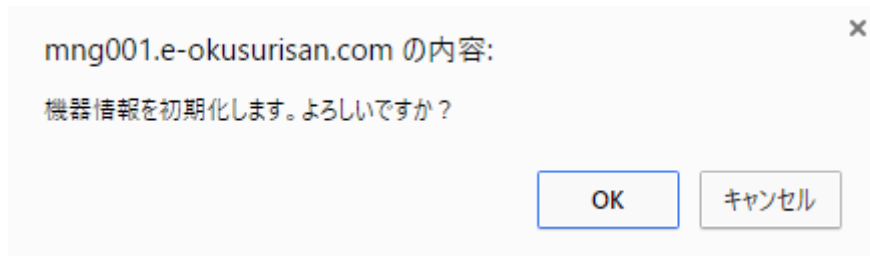

4.服薬情報の管理

服薬状況を確認する

管理対象の機器ごとに、服薬状況を確認することができます。画面には1カ月分の服薬状況がグラフと表で表示されます。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。




2. 確認したい機器の下部にある[詳しく見る]をクリックします。



3. 服薬状況のグラフと表が表示されます。

ここで表示されるグラフと表は PDF ファイルとしてダウンロードして印刷することができます。
これらの手順については「服薬状況の PDF ファイルをダウンロードまたは印刷する」を参考にしてください。

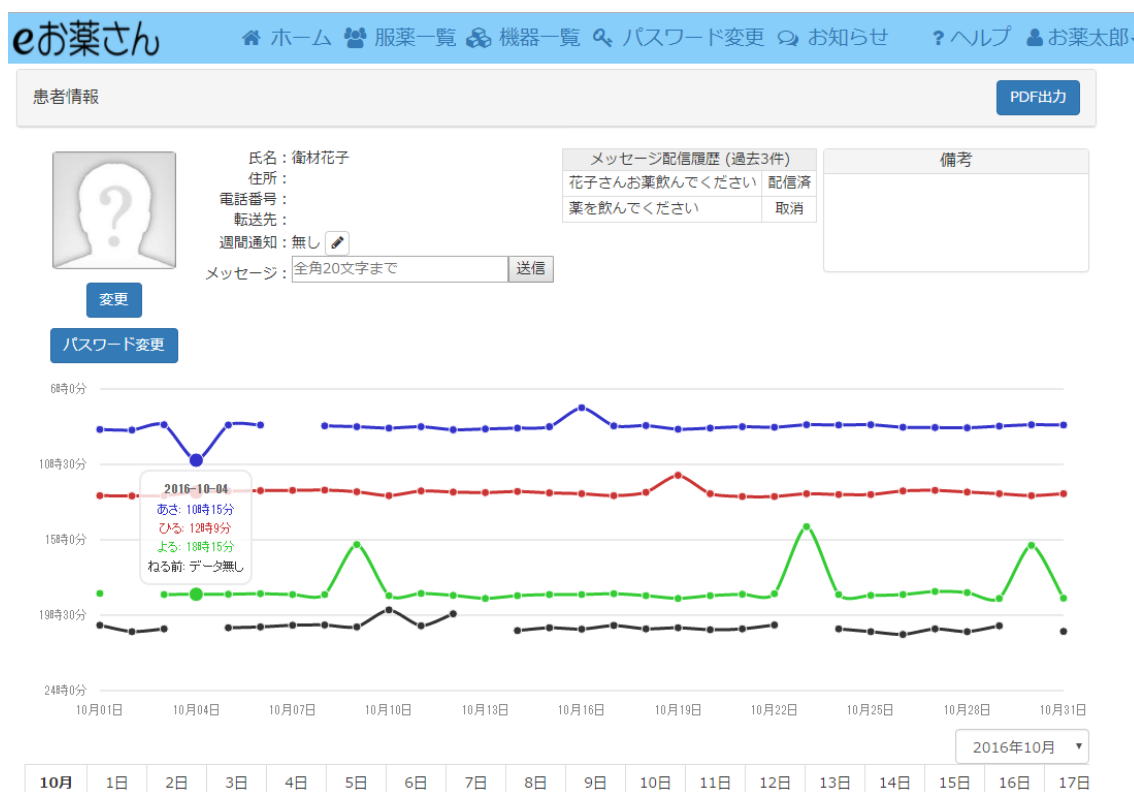

検索機能を利用する

指定したキーワードを含む機器を管理対象の機器から抽出できます。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。



2. 左上の検索窓にキーワード(機器情報に登録したシリアル番号や氏名など)をインプットし、検索ボタン(虫眼鏡マーク)をクリックします。

機器一覧

花子

SN: 1801t001 (患者: 衛材花子)

状態	管理対象外	発生日時	ステータス	内容
備考				

詳しく見る

服薬状況の PDF ファイルをダウンロードまたは印刷する

服薬状況のグラフと表の PDF ファイルをダウンロードすることができます。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。

2. ダウンロードしたい機器の下部にある[詳しく見る]をクリックします。

お知らせ ? ヘルプ お薬太郎

機器情報登録

機器情報クリア 機器一覧から削除

内容

た

た

詳しく見る

3. 表示されるユーザー情報の右上にある[PDF 出力]をクリックします。

患者情報

氏名：衛材花子
住所：
電話番号：
転送先：
週間通知：無し
メッセージ：全角20文字まで 送信


メッセージ配信履歴 (過去3件)
花子さんお薬飲んでください 配信済
薬を飲んでください 取消

備考

変更
パスワード変更

PDF出力

4. ブラウザにより、PDF が表示されるか、ファイル保存の画面が表示されます。

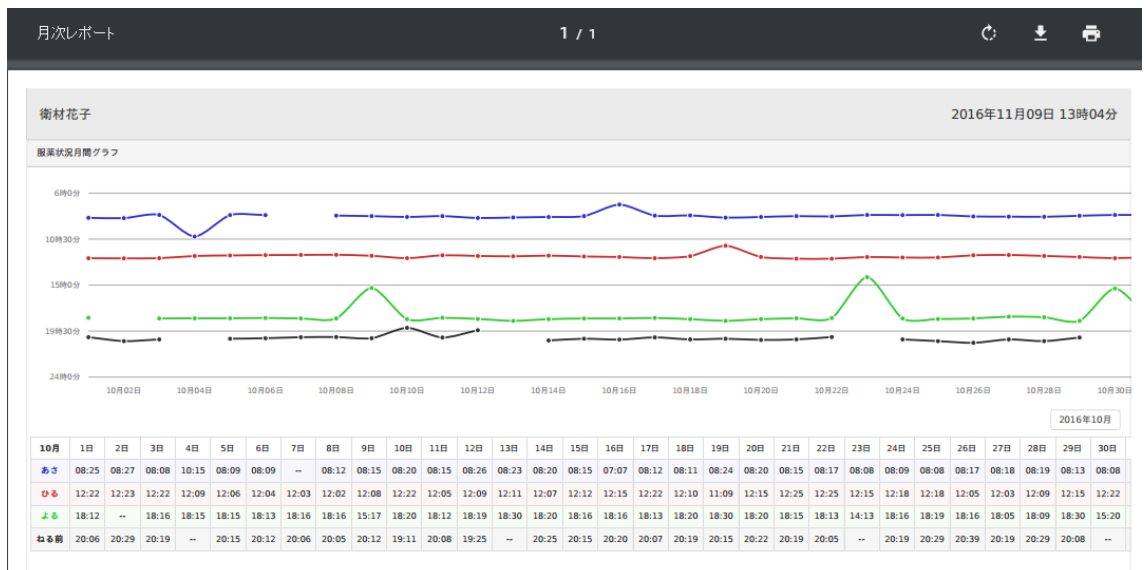

5. PDF ファイルの印刷の仕方

PDF ファイルの印刷は以下の2つの方法があります。

- ① Web ブラウザに PDF が表示されている場合は、画面上の**プリンタアイコン**をクリックすることで印刷することができます。
- ② ダウンロードした PDF ファイルを Adobe Acrobat Reader などの閲覧ソフトで開き、印刷します。

メッセージを送信する

機器にメッセージを送信することができます。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。

eお薬さん

ホーム 服薬一覧 **機器一覧** パスワード変更 お知らせ

服薬情報

表示できるデータがありませんでした。

管理者からのお知らせ

お知らせはありません。

2. メッセージを送信する機器の下部にある[詳しく見る]をクリックします。



3. メッセージを入力して[送信]ボタンをクリックします。クリック後、「メッセージ配信履歴」の一覧にメッセージが表示されます。

患者情報



氏名：衛材花子
住所：
電話番号：
転送先：
調剤通知：無し 

メッセージ：全角20文字まで

2017年11月22日（水）

通信中

13 : 12

次のお薬 よる 17 : 00

おばあちゃん薬飲んでね

5.その他

ログイン用パスワードを変更する

1. 画面上部メニューの[パスワード変更]をクリックします。



2. パスワード変更用の画面が表示されますので、[新パスワード]と[確認パスワード]の両方に新しいパスワードを入力します。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) form. The '新パスワード' (New Password) field is labeled '新パスワード [必須] パスワードは 英字と数字の両方を含む6桁以上で設定してください。' (New Password [Required] Password must be 6 or more characters, including letters and numbers). The '確認パスワード' (Confirm Password) field is labeled '確認パスワード [必須] 確認の為、再度パスワードを入力してください。' (Confirm Password [Required] For confirmation, please enter the password again). Both input fields are circled in red. At the bottom of the form, there are two buttons: '登録' (Register) and 'キャンセル' (Cancel).

3. [登録]ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) form after clicking the '登録' button. The '新パスワード' (New Password) field is labeled '新パスワード [必須] パスワードは 英字と数字の両方を含む6桁以上で設定してください。' (New Password [Required] Password must be 6 or more characters, including letters and numbers). The '確認パスワード' (Confirm Password) field is labeled '確認パスワード [必須]'. Both input fields are empty. At the bottom of the form, there are two buttons: '登録' (Register) and 'キャンセル' (Cancel). The '登録' button is circled in red.

4. パスワードの変更が完了しますとホーム画面に戻ります。



管理者プロフィールを変更する


* 管理者のプロフィールは、登録申請時の内容で登録されています。

e お薬さんクラウドサービスに登録されているプロフィール(管理者情報)を変更します。

1. 画面の上部右側に管理者の名前が表示されているのでクリックします。



2. 表示された一覧内の[プロフィール]をクリックします。

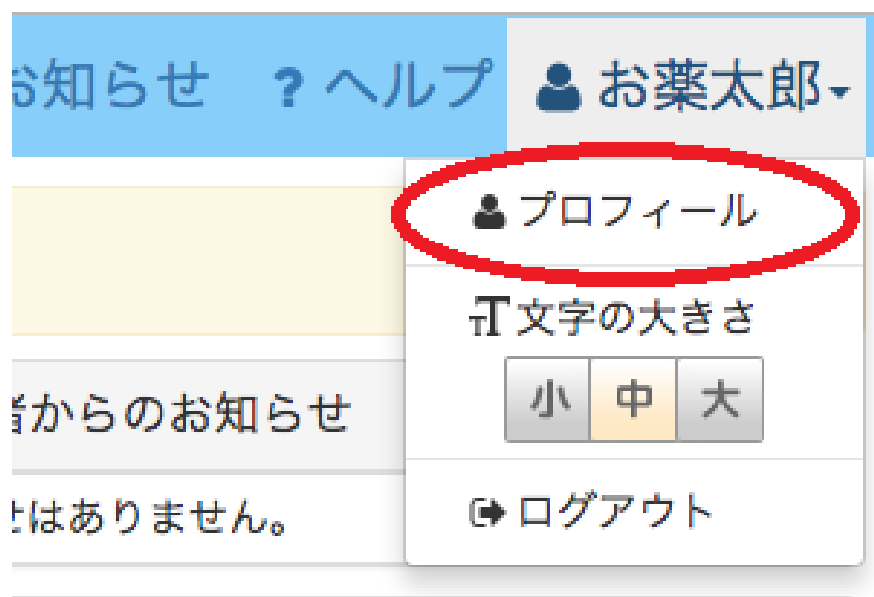

3. プロフィール画面が表示されます。

プロフィール

アカウント	okusuri@e-okusurisan.com
氏名	お薬太郎
かな	
性別	
住所	
建物	
電話番号	
メール	okusuri@e-okusurisan.com
転送先 :	

変更

4. プロフィール一覧の[変更]ボタンをクリックします。

プロフィール

アカウント	okusuri@e-okusurisan.com
氏名	お薬太郎
かな	
性別	
住所	
建物	
電話番号	
メール	okusuri@e-okusurisan.com
転送先 :	

変更

5. アカウント変更用の画面が表示されます。

アカウント変更

ログインアカウント 【必須】
okusuri@e-okusurisan.com

氏名（苗字） 【必須】
お薬

氏名（名前） 【必須】
太郎

氏名（みょうじ）
苗字をかなで入力してください。

氏名（なまえ）
名前をかなで入力してください。

性別

登録 リセット キャンセル

6. 変更する項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

アカウント変更

建物名を入力してください。

電話番号
電話番号を入力してください。

転送先メールアドレス
転送先メールアドレスを入力してください。 +

※個人を特定できるメールアドレスを登録しないでください。

備考
備考の入力ができます。

登録 リセット キャンセル

7. 登録が完了するとプロフィール画面に戻ります。



プロフィール	
アカウント	okusuri@e-okusari
氏名	お薬太郎
かな	おくすりたろう

患者様のプロフィールを変更する

管理対象の機器を利用されている患者様のプロフィール情報を変更します。プロフィール情報の変更画面で、通知メールの転送先（ユーザーのメールアドレス）を登録することができます。

【ご注意】

転送先メールアドレスを登録される際は、事前に患者様やご家族にご確認ください。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。



2. 機器一覧画面に移動します。



3. プロフィール変更対象の機器の下部にある[詳しく見る]をクリックします。

お知らせ ? ヘルプ お薬太郎

機器情報登録

機器情報クリア 機器一覧から削除

内容

ノ

た

た

ノ

詳しく見る

4. 患者様情報画面に移動します。

eお薬さん ホーム 服薬一覧 機器一覧 パスワード変更 お知らせ ヘルプ お薬太郎

患者情報 PDF出力

氏名: 衛材花子
住所:
電話番号:
転送先:
週間通知: 無し
メッセージ: 全角20文字まで 送信

メッセージ配信履歴 (過去3件)
花子さんお薬飲んでください 配信済
薬を飲んでください 取消

備考

変更

パスワード変更

2016-10-04
あさ: 10時15分
ひる: 12時9分
よる: 18時15分
ねる前: データ無し

6時0分
10時30分
15時0分
19時30分
24時0分

10月01日 10月04日 10月07日 10月10日 10月13日 10月16日 10月19日 10月22日 10月25日 10月28日 10月31日

2016年10月

10月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日

5. [変更]ボタンをクリックするとアカウント変更の画面が表示されます。

患者情報



氏名：衛材花子
住所：
電話番号：
転送先：
週間通知：無し 
メッセージ：全角20文字まで 送信

変更
パスワード変更

6. 変更する項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。
登録が完了するとユーザー情報画面に戻ります。

アカウント変更 ×

ログインアカウント
1801t001@e-okusurisan.com

写真

ファイルを選択 選択されていません

※ファイルサイズは2M未満にしてください。

氏名（苗字） **[必須]**

衛材

氏名（名前） **[必須]**

花子

氏名（みょうじ）

えいざい

氏名（なまえ）

はなこ

アカウント変更 ×

電話番号

転送先メールアドレス
 +

※個人を特定できるメールアドレスを登録しないでください。

備考

登録

リセット

キャンセル

eお薬さん [ホーム](#) [服薬一覧](#) [機器一覧](#) [パスワード変更](#) [お知らせ](#) [ヘルプ](#) [お薬太郎](#)

更新しました。 ×

患者情報 PDF出力



変更

パスワード変更

氏名：衛材花子
住所：
電話番号：
転送先：
週間通知：無し 

メッセージ：

送信

メッセージ配信履歴 (過去3件)

備考

お知らせを登録する

クラウドサービスを利用されているユーザーに連絡したいメッセージを、お知らせとして通知することができます。お知らせは、すべての管理対象機器のホーム画面に表示されます。


1. 画面上部メニューの[お知らせ]をクリックします。



2. お知らせ画面に移動します。



3. [+](追加)ボタンをクリックします。

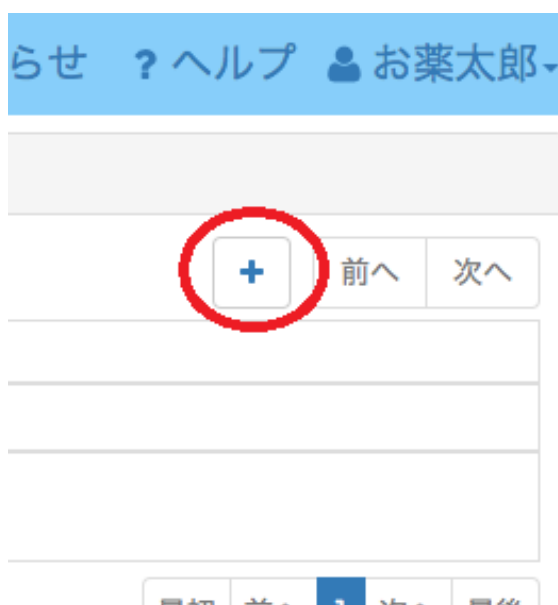

4. 「お知らせ追加」画面が表示されますので、メッセージを入力し[登録]ボタンをクリックします。

お知らせ追加

メッセージ **【必須】**

お知らせサンプル

登録

キャンセル

5. 登録が完了するとお知らせが通知されます。

完了確認

管理番号： 2

メッセージ： お知らせサンプル

続けて登録

閉じる

6. [閉じる]ボタンをクリックするとお知らせ画面に戻ります。

eお薬さん

ホーム 服薬一覧 機器一覧 パスワード変更 お知らせ ヘルプ お薬太郎

お知らせ

+

前へ

次へ

日付	投稿者	メッセージ内容
01月12日	管理者	お知らせサンプル
11月01日	システム管理者	システム管理者からのお知らせ 2016/11/1 eお薬さんクラウドサービスが正式リリースされました。

(全 1 件中 - 1 ~ 1 件表示)

最初

前へ

1

次へ

最後


文字の大きさを変更する

e お薬さんクラウドサービスで使用する文字の大きさを 3 種類から選択できます。
お使いの環境にあわせて設定してください。

1. 画面の上部右側に管理者の名前が表示されているのでクリックします。



2. [文字の大きさ]項目から、お使いの環境に合う文字サイズをクリックします。

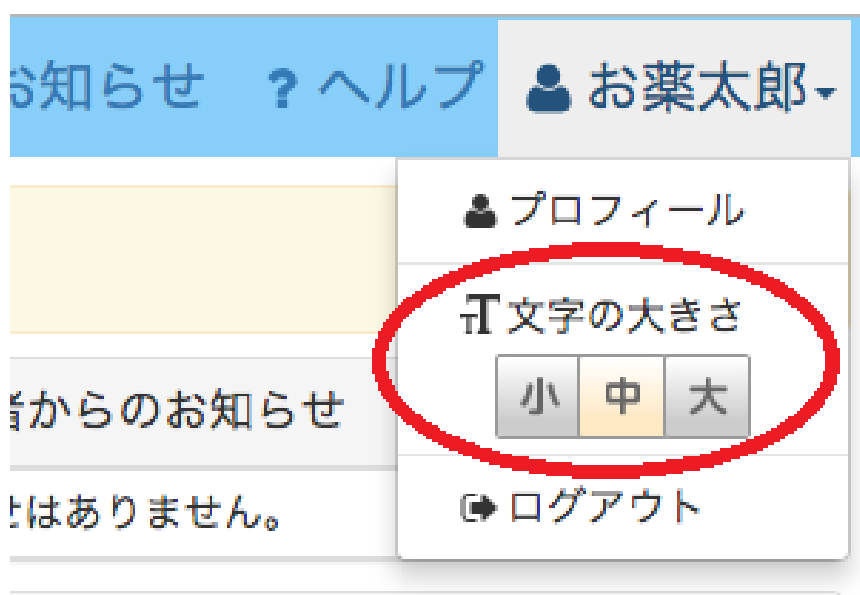

お薬ケースを補充する曜日を登録する(週間通知)

お薬ケースを補充する曜日を登録すると、当日の朝にお知らせメールを受け取ることができます。
例えば、前日にお知らせメールを希望される場合、実際に補充する曜日の1日前を登録してください。
お知らせメールは、管理者と、管理者登録時に転送先として入力したアドレスに送信されます。

1. 画面上部メニューの[機器一覧]をクリックします。



2. 機器一覧画面に移動します。



3. 週間通知を設定する機器の下部にある[詳しく見る]をクリックします。



4. 患者情報画面に移動します。




5. 顔写真の横にある「週間通知」の鉛筆マークをクリックすると、通知曜日の変更画面が表示されます。

患者情報

氏名: 衛材花子
住所:
電話番号:
転送先:
週間通知: 無し
メッセージ: 全角20文字まで 送信

変更
パスワード変更

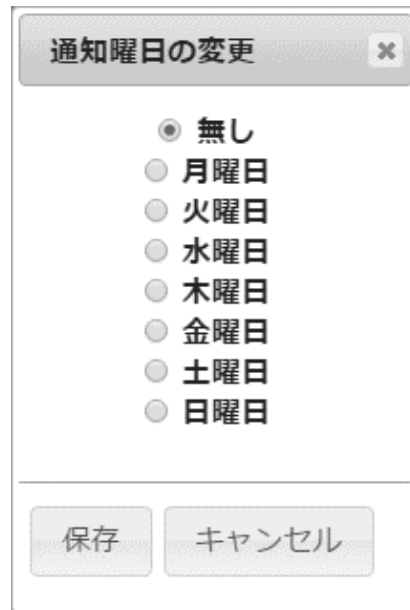

通知曜日の変更

- ☒ 無し
- ☐ 月曜日
- ☐ 火曜日
- ☐ 水曜日
- ☐ 木曜日
- ☐ 金曜日
- ☐ 土曜日
- ☐ 日曜日

保存 キャンセル

6. 登録する曜日をチェックし、[保存]ボタンをクリックします。
保存が完了すると患者様情報画面に戻ります。
ここで設定した通知曜日に「本日がお薬ケース補充曜日です」というメールが送信されます。