
# お知らせ

#### 服薬支援機器

# eお薬さん

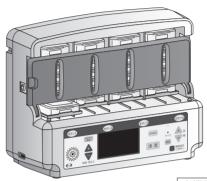

当機器は医療機器ではありません

## 新ソフトウェアリリースのお知らせ

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。 現在、ご利用いただいている1日4回(7日分ご利用)に加えて、 新たに、1日1回(28日分ご利用)、及び1日2回(14日分ご利用)に 対応したソフトウェアをそれぞれリリースいたしました。 患者様の1日の服用回数に合わせてインストールしてください。

#### インストールの準備と方法

- ①ホームページ (e-okusurisan.com) にからパソコンにソフトをダウンロードする
- ② パソコンに保存したソフトを USB メモリーにコピーする (暗号化機能付き USB メモリーはご使用にならないでください)
- ③機器にUSBメモリーを差し込んで、機器設定から「メンテナンスモード」を選択し、「USBアップデート」を行う

  ⇒詳細は次ページをご参照ください

服用回数の設定方法は、3ページと4ページです。



Eisai エーザイ株式会社


# 1 新ソフトウェアのインストール方法

### 「メンテナンスモード」に入る

「USBアップデート」をするために 「メンテナンスモード」に入ります。

- ① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。
- ② [+]または「一」ボタンで「メンテナンスモード」を選択し、 「決定 | ボタンを押します。
- ③ 機器フロントパネルボタンを「よる」「ひる」「あさ」の順に押します。
- ④ 左下の文字が「実行」になっていることを確認して、 「決定 | ボタンを押してください。

以上で「メンテナンスモード」に入りました。 続いて「USBアップデート」を行ってください。

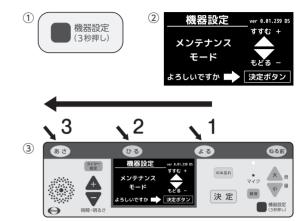



# 「USBアップデート」を行う

「USBアップデート」を実行し、 新しいソフトウェアにします。

- ① [+] [ー] ボタンから [USB アップデート] を選択した後、USB メモリを機器本体に挿入し、「決定」 ボタンを押してください。
- ② 実行画面に移行しますので、USB メモリが接続されていることを 確認した後に、「決定」ボタンを押してください。
- ③ USB メモリのアップデートファイルがシステムのものよりも新しい場合には③の実行画面が表示されます。
- ④ システムが最新の場合や、USB メモリにアップデート用のファイルが無い等の場合はその旨が画面に表示され、通常画面に戻ります。
- ⑤アップデート作業が終了すると、その結果が表示されます。
- ⑥ その後、右の画面が表示され、再起動を行います。 再起動後、通常画面に戻ります。





③ ファイルアップデート中です。絶対に電源を切らないでください。



⑤ ファイルアップデートに 成功しました

再起動を行います。電源を切らずにお待ちください。

\*各画面で30秒操作されない場合、ホーム画面(時間表示)に戻ります。

# 2 服用回数の設定方法(1日1回)

「あさ」「ひる」「よる」「ねる前」のボタンがそれぞれ「ボタン1」「ボタン2」「ボタン3」「ボタン4」となります。シールをご用意しますので、貼付してください。

### 1日1回(28日分ご利用)のタイマー設定

1日あたり4回となっている服用回数を1回とすることで、 1台に28日分のお薬ケースを収納できるようにします。




- ① 「タイマー設定」ボタンを押します。
- ② 現在のタイマー設定時間が表示されます(タイマー設定一覧)。 画面下に「設定する→決定ボタン」と表記されますので、 設定時刻を変更する場合は、「決定」ボタンを押します。 タイマーは、8:00に初期設定されています。
- ③ お薬タイマー設定画面が表示されます。設定したい服薬時点のボタンを押します。
- ④ [+]または「一」ボタンを押して、時間を設定し、「決定」ボタンを押します。[+|または「一」を1回押すごとに1分動きますが、長押しすると10分単位で動きます。
- ⑤ 他の服薬時点を設定する場合は、「タイマー設定」ボタンを押します。 設定を終了する場合は「決定」ボタンを押します。

※続けてタイマー設定を行う場合、②~⑤の動作を繰り返します。

- ⑥ タイマー設定を終了する場合、タイマー設定終了時に変更を反映したタイマー設定一覧が表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押して終了します。 これで、タイマー設定は完了です。
- \*各画面で30秒操作されない場合、ホーム画面(時間表示)に戻ります。



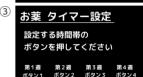







# 日数カウンタを初期化する



#### 日数カウンタをリセットします。

- ① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。
- ② [+]または[-]ボタンで[日数カウンタの初期化]を 選択し、「決定」ボタンを押します。
- ③ 「第1週の初日に戻します」と表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押します。
- ④ 日数カウンタ初期化の画面が表示されます。 終了すると、ホーム画面(時計表示)に戻ります。

# ② 機器設定 ver 8.08.002 10 すずむ + 日数カウンタの 初期化 よろしいですか ➡ 決定ボタン ③ 日数カウンタの初期化 第1週の初日に戻します 初期化 ➡ 決定ボタン ④ 機器設定完了

日数カウンタが

初期化されました

#### のみ忘れた時の画面

- ① 「のみ忘れ」ボタンを押します。
- ②ご利用の週の取り出し画面が表示されます。 (例えば、第3週の場合、「ボタン3」と表示されます。)



② お薬の取り出し 取り出したい時間帯の ボタンを押してください

# 3 服用回数の設定方法(1日2回)

「あさ」「ひる」「よる」「ねる前」のボタンがそれぞれ「ボタン1」「ボタン2」「ボタン3」「ボタン4」 となります。シールをご用意しますので、貼付してください。

# 1日2回(14日分ご利用)のタイマー設定

1日あたり4回となっている服用回数を2回とすることで、 1台に14日分のお薬ケースを収納できるようにします。

(1)

- ① 「タイマー設定 | ボタンを押します。
- ② 現在のタイマー設定時間が表示されます(タイマー設定一覧)。 画面下に「設定する→決定ボタン」と表記されますので、 設定時刻を変更する場合は、「決定」ボタンを押します。 タイマーは、次の時間で初期設定されています。


第1週1回目8:00 第1週 2回目 18:00 第2週 1回月 8:00 第2週 2回日 18:00

- ③ お薬タイマー設定画面が表示されます。設定したい服薬時点のボタンを押します。
- ④ [+]または[-]ボタンを押して、時間を設定し、「決定」ボタンを押します。 「+|または「-|を1回押すごとに1分動きますが、長押しすると10分単位で動きます。
- (5) 他の服薬時点を設定する場合は、「タイマー設定」ボタンを押します。 設定を終了する場合は「決定」ボタンを押します。


※続けてタイマー設定を行う場合、②~⑤の動作を繰り返します。

- ⑥ タイマー設定を終了する場合、タイマー設定終了時に変更を反映したタイマー設定一覧 が表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押して終了します。 これで、タイマー設定は完了です。
- \*各画面で30秒操作されない場合、ホーム画面(時間表示)に戻ります。

#### (2) 第1週 1 🗆 🗏 第1调 2回目 18:00 第2调 1 🗆 🗏 8:00 第2调 18:00 2回目

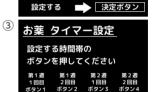



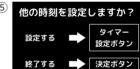



## 日数カウンタを初期化する

日数カウンタをリセットします。

- ① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。
- ② [+]または[-]ボタンで[日数カウンタの初期化]を 選択し、「決定」ボタンを押します。
- ③ 「第1週の初日に戻します」と表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押します。
- ④ 日数カウンタ初期化の画面が表示されます。 終了すると、ホーム画面(時計表示)に戻ります。

#### (1) 機器設定



# のみ忘れた時の画面

- ① 「のみ忘れ」ボタンを押します。
- ②ご利用の週の取り出し画面が表示されます。 (例えば、第1週1回目の場合、「ボタン1」を押します。)



お薬の取り出し 取り出したい時間帯の ボタンを押してください

初期化されました

# 4 ソフトウェア変更時の対応について(お願い)

ソフトウェアを変更する場合、下記の操作を実行してください。

#### 工場出荷状態に戻す

「メンテナンスモード」(利用方法はこのお知らせ P2参照)の「工場出荷状態に戻す」操作を行う。

- ①メンテナンスモードに入ります。(操作方法は P2参照)
- ② [+]または[一]ボタンで[工場出荷状態に戻す]を選択し、 [決定]ボタンを押します。
- ③ 実行画面に移行しますので「決定」ボタンを押してください。
- ④ 処理が始まると処理中の画面が表示されます。
- ⑤ 処理終了後に結果が表示され、その後に再起動が行われます。
- ⑥ その後、右の画面が表示され、再起動を行います。 再起動後、通常画面に戻ります。

アプリケーションを 工場出荷状態に戻します 戻す → 決定ボタン

④

メンテナンス処理中です。
終了後再起動を行います。
絶対に電源を切らないでください。

⑤

メンテナンス処理が
正常に終了しました

⑥

再起動を行います。
電源を切らずにお待ちください。

メンテナンス 工場出荷状態

工場出荷状態に戻す

よろしいですか 📂 決定ボタン

\*各画面で30秒操作されない場合、ホーム画面(時間表示)に戻ります。

# 「USBアップデート」を行う

「メンテナンスモード」(利用方法はこのお知らせ P2参照)の「USB アップデート」を操作して変更するソフトウェアをインストールする。

# 5 ご利用者変更時の対応について(お願い)

ご利用者を変更された場合は、下記の操作を実行してください。

- ①機器本体の「機器設定」から「設定リセット」を選択し、タイマー設定や音声等を初期設定に戻す。
- ② 「メンテナンスモード」(利用方法はこのお知らせP2参照)の「ログ削除」を操作してログを削除する。
- ③ クラウドをご利用の場合は、「クラウド管理者マニュアル」P20に記載の「機器情報をクリアする」を操作してデータを消去してください。ただし、消去しても「過去情報表示」(P21)の機能により確認することができます。

もしくは同マニュアルP22に記載の「機器一覧から削除する」を操作して、データを完全に削除してください。この場合、過去のデータを確認することはできません。

# 機器情報をクリアする(過去のデータを残す方法)

管理対象の機器データを消去します。データは消去 されますが、管理対象の機器として表示されます。

- ① 画面上部メニューの「機器一覧」をクリックします。
- ② 機器一覧画面に移動します。
- ③ 情報を消去する機器の右上にある「機器情報クリア」をクリック すると、確認画面が表示されます。
- ④機器情報のクリアを聞かれます。情報を消去する場合は「OK」ボタンをクリックします。その後機器一覧画面に戻ります。

□にはチェックを入れないことをお薦めします。 (本画面を頻回に表示させないため)。

# 

# 機器一覧から削除する (過去のデータも削除する方法)

管理対象の機器を削除します。

- ① 画面上部メニューの「機器一覧」をクリックします。
- ②機器一覧画面に移動します。
- ③ 削除対象の機器の右上にある「機器機器一覧から削除」を クリックすると、確認画面が表示されます。
- ④機器情報の初期化を聞かれます。機器一覧から削除する場合は 「OK」ボタンをクリックします。その後機器一覧画面に戻ります。

削除すると当該機器の過去情報を確認することができなくなります。

