


服薬支援機器 eお薬さん

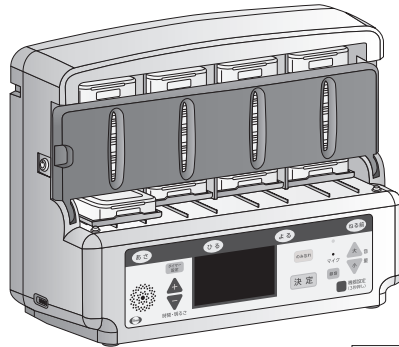

当機器は医療機器ではありません

ソフトウェアアップデートのお願い

この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
トレー動作時の不良発生リスク^(※)を下げるため、また利便性向上
のために下記の要領にて機器ソフトのアップデートをお願いいたし
ます。

(※)ご利用者が間違っってトレーを押さえた際に生じるモーターギアの破損

ホームページ(e-okusuran.com)にある「機器メンテナンス・モード
マニュアル(管理者用)」から、アップデートの方法をご確認ください。

クラウドと定期通信されている場合

メンテナンス・モードからダウンロードしてください

クラウドと定期通信されていない場合

- ① ホームページからパソコンにソフトをダウンロードする
- ② パソコンに保存したソフトを USB メモリーにコピーする
(暗号化機能付き USB メモリーはご使用にならないでください)
- ③ 機器にUSBメモリーを差し込んで、機器設定からメンテナンス・モード
を選択し、USBアップデートを行う

追加機能につきましては、裏面をご覧ください。

[新規追加機能の操作方法]

「ボタン操作を無効にする」機能の設定は、メンテナンスモードで行う必要があります。

「メンテナンスモード」の操作方法は、「eお薬さん」のホームページ(e-okusurisan.com)にある「機器メンテナンス・モードマニュアル(管理者用)」をご参照ください。


「全ボタン無効」はメンテナンスモードの4画面目、「飲み忘れ以外無効」は5画面目で設定します。

全ボタンの操作を無効にする

不必要なボタン操作による動作を防止するため、全ボタンの操作を無効にします。

- ① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。
- ② 「+」または「-」ボタンで「メンテナンス」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ③ 「+」または「-」ボタンで「全ボタン操作無効」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ④ 「全ボタンの操作を無効にします。」と表示されますので「決定」ボタンを押します。
- ⑤ 終了すると、ホーム画面(時計表示)に戻ります。

* 電源の抜き差しで再起動を行うとボタン操作は有効に戻ります。

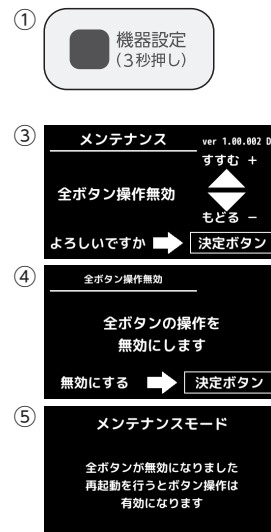


のみ忘れボタン以外の操作を無効にする

のみ忘れボタンと、あさ・ひる・よる・ねる前ボタン以外の操作を無効にします。

- ① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。
- ② 「+」または「-」ボタンで「メンテナンス」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ③ 「+」または「-」ボタンで「のみ忘れ操作以外無効」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ④ 「のみ忘れ操作以外のボタンを無効にします」と表示されますので「決定」ボタンを押します。
- ⑤ 終了すると、ホーム画面(時計表示)に戻ります。

* 電源の抜き差しで再起動を行うとボタン操作は有効に戻ります。

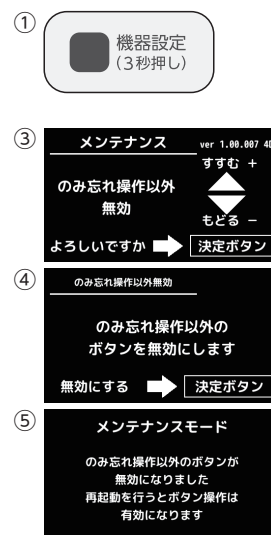

服薬を促す時間を設定する

お薬ケース取り忘れ時に服薬を促す音声の時間を設定します(初期設定は40分)。5分ごとに音声再生され、設定時間が過ぎるとトレーは自動で戻ります。

- ① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。
- ② 「+」または「-」ボタンで「服用促し設定」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ③ 「+」または「-」ボタンで「40分」か「60分」のいずれかを選択し、「決定」ボタンを押します。
- ④ 終了すると、ホーム画面(時計表示)に戻ります。

* 60分を設定する場合、服用間隔を121分以上に設定してください。

