


服薬支援機器
eお薬さん

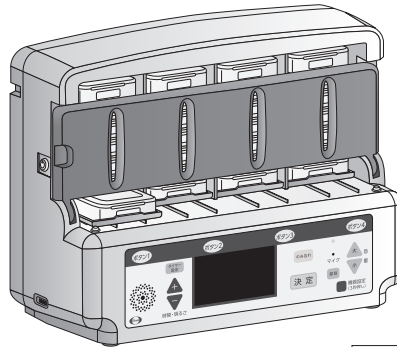

当機器は医療機器ではありません

新ソフトウェアリリースのお知らせ

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
現在、ご利用いただいている1日4回(7日分ご利用)に加えて、
新たに、1日1回(28日分ご利用)、及び1日2回(14日分ご利用)に
対応したソフトウェアをそれぞれリリースいたしました。
患者様の1日の服用回数に合わせてインストールしてください。

ホームページ(e-okusurisan.com)にある「機器メンテナンス・モード
マニュアル(管理者用)」から、インストール方法をご確認ください。

インストール方法

- ① ホームページからパソコンにソフトをダウンロードする
- ② パソコンに保存したソフトをUSBメモリーにコピーする
(暗号化機能付きUSBメモリーはご使用にならないでください)
- ③ 機器にUSBメモリーを差し込んで、機器設定からメンテナンス・モード
を選択し、USBアップデートを行う

設定方法につきましては、別紙をご覧ください。


「あさ」「ひる」「よる」「ねる前」のボタンがそれぞれ「ボタン1」「ボタン2」「ボタン3」「ボタン4」となります。
シールをご用意しますので、貼付してください。

1日1回、2回、4回に変更した後、他のソフトをインストールする場合は、いったん「工場出荷状態に戻す」操作を行ってください。
「工場出荷状態に戻す」操作は、「機器メンテナンス・モードマニュアル(管理者用)」をご確認ください。


1日1回(28日分ご利用)のタイマー設定

1日あたり4回となっている服用回数を1回とすることで、
1台に28日分のお薬ケースを収納できるようにします。


① 「タイマー設定」ボタンを押します。

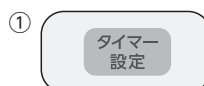


② 現在のタイマー設定時間が表示されます(タイマー設定一覧)。
画面下に「設定する→決定ボタン」と表記されますので、
設定時刻を変更する場合は、「決定」ボタンを押します。
タイマーは、8:00に初期設定されています。

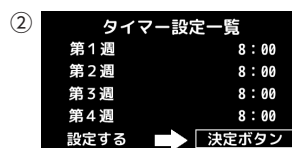


③ お薬タイマー設定画面が表示されます。設定したい服薬時点のボタンを押します。

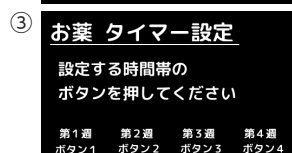

④ 「+」または「-」ボタンを押して、時間を設定し、「決定」ボタンを押します。
「+」または「-」を1回押すごとに1分動きますが、長押しすると10分単位で動きます。

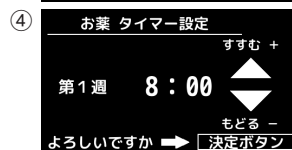


⑤ 他の服薬時点を設定する場合は、「タイマー設定」ボタンを押します。
設定を終了する場合は「決定」ボタンを押します。

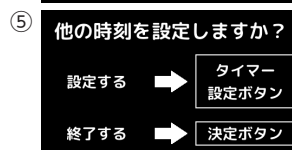

※続けてタイマー設定を行う場合、②～⑤の動作を繰り返します。

⑥ タイマー設定を終了する場合、タイマー設定終了時に変更を反映したタイマー設定一覧
が表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押して終了します。
これで、タイマー設定は完了です。

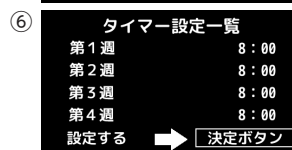

*各画面で30秒操作されない場合、ホーム画面(時間表示)に戻ります。


日数カウンタを初期化する

日数カウンタをリセットします。


① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。




② 「+」または「-」ボタンで「日数カウンタの初期化」を
選択し、「決定」ボタンを押します。

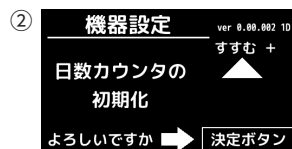

③ 「第1週の初日に戻します」と表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押します。

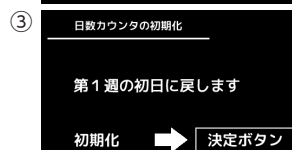


④ 日数カウンタ初期化の画面が表示されます。
終了すると、ホーム画面(時計表示)に戻ります。

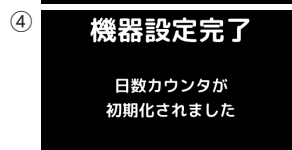


のみ忘れた時の画面

① 「のみ忘れ」ボタンを押します。

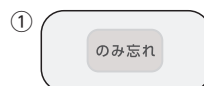

② ご利用の週の取り出し画面が表示されます。
(例えば、第3週の場合、「ボタン3」と表示されます。)

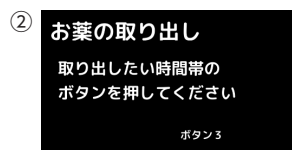


「あさ」「ひる」「よる」「ねる前」のボタンがそれぞれ「ボタン1」「ボタン2」「ボタン3」「ボタン4」となります。
シールをご用意しますので、貼付してください。

1日1回、2回、4回に変更した後、他のソフトをインストールする場合は、いったん「工場出荷状態に戻す」操作を行ってください。
「工場出荷状態に戻す」操作は、「機器メンテナンス・モードマニュアル(管理者用)」をご確認ください。

1日2回(14日分ご利用)のタイマー設定

1日あたり4回となっている服用回数を2回とすることで、
1台に14日分のお薬ケースを収納できるようにします。

① 「タイマー設定」ボタンを押します。

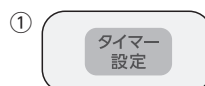

② 現在のタイマー設定時間が表示されます(タイマー設定一覧)。

画面下に「設定する→決定ボタン」と表記されますので、
設定時刻を変更する場合は、「決定」ボタンを押します。

タイマーは、次の時間で初期設定されています。

第1週 1回目 8:00 第1週 2回目 18:00

第2週 1回目 8:00 第2週 2回目 18:00

③ お薬タイマー設定画面が表示されます。設定したい服薬時点のボタンを押します。

④ 「+」または「-」ボタンを押して、時間を設定し、「決定」ボタンを押します。

「+」または「-」を1回押すごとに1分動きますが、長押しすると10分単位で動きます。

⑤ 他の服薬時点を設定する場合は、「タイマー設定」ボタンを押します。

設定を終了する場合は「決定」ボタンを押します。






※続けてタイマー設定を行う場合、②～⑤の動作を繰り返します。

⑥ タイマー設定を終了する場合、タイマー設定終了時に変更を反映したタイマー設定一覧

が表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押して終了します。

これで、タイマー設定は完了です。

*各画面で30秒操作されない場合、ホーム画面(時間表示)に戻ります。

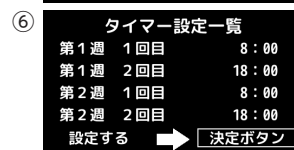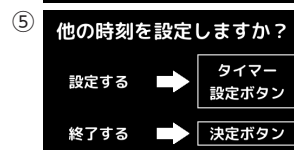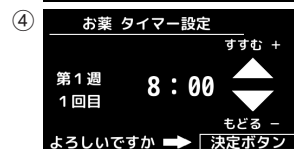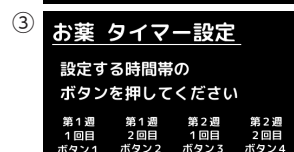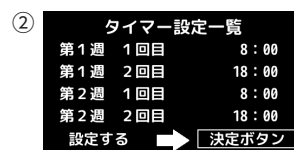

日数カウンタを初期化する

日数カウンタをリセットします。

① 「機器設定」ボタンを3秒長押しします。






② 「+」または「-」ボタンで「日数カウンタの初期化」を
選択し、「決定」ボタンを押します。

③ 「第1週の初日に戻します」と表示されます。よろしければ、「決定」ボタンを押します。

④ 日数カウンタ初期化の画面が表示されます。

終了すると、ホーム画面(時計表示)に戻ります。

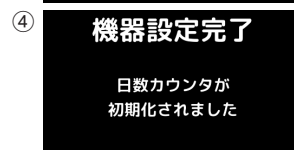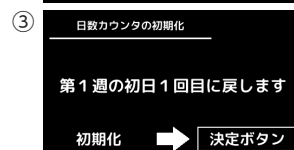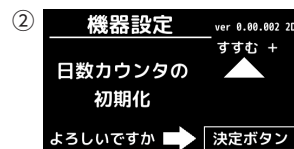

のみ忘れた時の画面

① 「のみ忘れ」ボタンを押します。



② ご利用の週の取り出し画面が表示されます。

(例えば、第1週1回目の場合、「ボタン1」を押します。)

